




neodisher® MediKlar

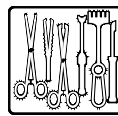

Skyllevæske for maskinell behandling av termostabile og termolabile instrumenter



Flytende konsentrat

Bruksområde:

- Skylling av medisinske produkter, som kirurgiske instrumenter inkl. øye-instrumenter, anesthesiutstyr, instrumentbeholdere og implantater samt tåteflasker i rengjørings- og desinfeksjonsutstyr

Omfang:

- Svært gode påføringsegenskaper – for rask tørking av behandlet gods, uten striper
- Sterile emballasjer av papir/folie påvirkes ikke negativt gjennom kontakt med medisinske produkter som ble behandlet med neodisher MediKlar
- Tilbehørsdeler til anesthesiutstyr av polysulfon (PSU) og polyfenylensulfon (PPSU) som f.eks. koblinger til larynxmasker, ventiler, adaptere og deler til lokk på instrumentbeholdere kan danne spenningssprekker når de kommer i kontakt med skyllemidler. De må kontrolleres for egnethet i hvert enkelte tilfelle
- Ved riktig bruk av neodisher MediKlar påvirkes ikke biokompatibiliteten til instrumentene som behandles (biologisk vurdering av medisinske produkter iht. EN ISO 10993-1)

Spesielle egenskaper:

- Forkorter tørketiden betraktelig
- Reduserer tids- og energibehovet under maskinell behandling

Bruk og dosering:

neodisher MediKlar brukes i sluttskyllingen i rengjørings- og desinfeksjonsenheter. Doseringsmengden er blant annet avhengig av utstyret som skal skylles og vannkvaliteten og er på 0,3 - 1,0 ml/l. Doseringen gjøres i vannet til sluttskyllingen.

Bruk egnede doseringsenheter for dosering.

Det anbefales å bruke demineralisert vann i sluttskyllingen for å unngå vannflekker.

Generelle henvisninger for bruk:

- Kun for yrkesmessig bruk.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Skylles med vann før produktskifte i doseringssystemer, inkl. sugeslanger.
- Bruksanvisningene til produsenten av rengjørings- og desinfeksjonsutstyr må overholdes.
- Reprosesseringen må utføres i samsvar med lovgivningen om medisinsk utstyr og gjeldende forskrifter ved bruk av egnede validerte prosedyrer.
- Vær oppmerksom på anbefalingene for reprosessering til produsenten av det medisinske utstyret tilsvarende kravene i DIN EN ISO 17664.

Tekniske data:

pH-verdi	6,4 (0,3 - 1,0 ml/l, bestemt i fullstendig demineralisert vann, 20 °C)
Viskositet	< 50 mPa s (konsentrat, 20 °C)
Tetthet	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)



Innholdstoffer:

Ingredienser til rengjøringsmidler i henhold til

EUs vaskemiddelforordning 648/2004:

< 5 % anioniske overflateaktive stoffer,

polykarboksylater

5 - 15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer

i tillegg konserveringsmiddel

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropan-1,3-diamin, blanding av: 5-klor-

2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7] og

2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]

(3:1)

CE-merking:

neodisher MediKlar oppfyller kravene som følger av europeisk lovgivning om medisinsk utstyr.

Kontakt produsenten og ansvarlig myndighet, dersom det oppstår en alvorlig situasjon med dette produktet.

Henvisninger for oppbevaring/lagring:

En temperatur mellom 0 og 30 °C må overholdes

ved lagring. Kan oppbevares i 2 år ved riktig

lagring. Kan brukes til: se stempel på etiketten bak

symbol .

Fare- og sikkerhetshenvisninger:

Sikkerhets- og miljøinformasjoner finnes i

sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige

under www.drweigert.de i seksjonen

“Service/downloads”.

Beholdere må kun avhendes tomme og lukket.

Avhending av materialrester: se

sikkerhetsdatablad.

MB 4045/3-3

Utgave: 05/2023

