

Belimed Protect™ Cleaner and Disinfectant

For automatisert rengjøring/vedlikehold av sengebunner, madrasser, beholdere, transportvogner, rullestoler, nattbord, samt bord, utstyr eller sko brukt i operasjonsrom



Bruk Belimed Protect™ Cleaner and Disinfectant i desinfeksjonsapparater/storkammer vaskemaskiner og for kjemisk-termisk rengjøring/vedlikehold av ikke-invasivt medisinsk utstyr. Bakteriedrepende, levorucidal og begrenset virucidal effekt, renser og desinfiserer sengetøy, traller, beholdere, nattbord og operasjonsbord.

- Anbefalt for rengjøring og desinfisering av ikke-invasivt medisinsk utstyr, f.eks. Stieglmeyer senger
- Er i henhold til AK-BWA (Dekontamineringssystemer for sengebunner og traller)
- Desinfiseringseffektiviteten er testet iht. EN ISO 15883-7 (2016)
- Utmerket anti-mikrobiell effekt
- Brukervennlig, lavt-skummende, aldehydfri
- God materialkompatibilitet på grunn av nøytral pH-verdi

Emballasje str.:

10 L/25 L

Effekt

Mikrobiologiske verdier for Belimed Protect™ Cleaner and Disinfectant (in vitro)

Mikrobiologiske effekter ved 55°C/kons. 1.0%	Applikasjons tid
Bakterier (<i>E. faecium</i>), EN ISO 13727	1 min
Gjær (<i>C. albicans</i>) EN ISO 13624	3 min
Mycobacteria (<i>M. terrae</i>) EN ISO 14348	3 min
Kappeledd(innkapslet) virus (MVA) EN ISO 14476	3 min

Disse in-vitro testene er utført ved bruk av vann med standardisert hardhet (WSH). Mikrobiologisk effekt ble målt under normale bruksforhold i desinfeksjonsapparater/storkammer vaskemaskiner på ulikt medisinsk utstyr infisert med *E. faecium* iht. AK-BWA og ISO 15883-7 Annex D.

Produkt navn	Belimed Protect™ Cleaner and Disinfectant
Fortynning og arbeidstemperatur	5-10 mL/L, 55-75°C, 5 min.
CE merking	I henhold til European Directive 93/42/EEC, oppfyller The Europeann Regulation (EU)2017/745, Annex 1
Farge	Klar/fargeløs til lysegul
pH i bruksløsning	pH 5-8 (Deionisert vann)
Lagringstemperatur	5-25°C
Levetid/holdbarhet	36 måneder
Avhending	Se SDS

Produktegenskaper - oversikt

Denne tabellen er veiledende.

	Bruksområde						Mikrobiologisk profil						pH-verdi (ferdige bruksløsninger)		
	Rengjøring av instrumenter	Desinfisering av instrumenter	Maskinvask av bekken	For glassvarer	For termolabile instrumenter	For fleksible endoskoper	Bakterier (alle vegetative bakterier inkl. multi resistente bakterier f.eks. MRSA, VRE, ESBL)	Levurocidal (gjær)	Fungicidal (sopp)	Mycobactericidal (f.eks. Tuberkulose bakterier)	Virucidal for kappekledde (innkapslet) virus (inkl. HBV, HCV, HIV)*	Fullt virucidal (kappekledde (innkapslet) og nakent virus f.eks. papillomavirus, parvovirus)	Svakt basisk	Nøytral	Surt
Belimed Protect™ Pre Treat Spray	•											•			
Belimed Protect™ Neutral Enzyme Cleaner	•				•	•							•		
Belimed Protect™ Mild Alkaline Enzyme Cleaner	•				•	•						•			
Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner	•		•	•	•							•			
Belimed Protect™ Rinse and Dry Aid				•									•		
Belimed Protect™ Scale and Rust Remover														•	
Belimed Protect™ Neutralizer				•										•	
Belimed Protect™ Glutaraldehyde Disinfectant		•			•	•	•	•	•	•	•		•		
Belimed Protect™ Cleaner and Disinfectant						•	•		•	•			•		
Belimed Protect™ Bedpan Cleaner			•											•	

*I henhold til RKI-anbefalinger, Federal Health Gazette 01-2004

Brukerveiledning

Følg produsentens anbefalinger for rengjøring og vedlikehold av medisinsk utstyr i henhold til EN ISO 17664. For flere detaljer angående rengjøring og vedlikehold av instrumenter se informasjon på www.a-k-i.org.

Sikkerhetsinformasjon

For sikkerhet og håndtering se i sikkerhetsdatabladet (SDS).

Tilknyttede produkter og tjenester

Utvalget av Belimed Protect™ kjemikalier er utviklet og evaluert sammen med Belimed Washer Disinfectors og AERs for å tilfredsstille rengjøringskravene for medisinsk utstyr i henhold til konsistente og repeterbare standarder angitt i ISO 15883. For ytterligere informasjon angående optimering av rengjøringsprosedyrer og /eller feilsøking, kontakt din nærmeste Belimed AG representant.

Belimed Protect Symboler- Anbefalt bruk



Ved automatisk rengjøring/vedlikehold i WDS/AERs



Ved manuell rengjøring/vedlikehold



Kan brukes med fleksible endoskoper

Belimed Protect Fargekode system - Produktkategori



For rengjøring



For desinfisering



For nøytralisering



For skylning og tørking



For drift og vedlikehold