




neodisher® TN

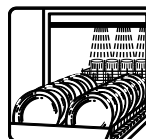

Nøytralt spesialskyllemiddel for materialer som er vanskelig å fukte



Flytende konsentrat

Bruksområde:

- Skylling av service, glass, bestikk, brett og arbeidsredskaper i kommersielle oppvaskmaskiner, samt beholdere og transportvogner i dekontamineringsanlegg i alle bedrifter som behandler næringsmidler, som storkjøkken, slakterbutikker og bakeri
- Skylling av materialer som er vanskelige å fukte, som sengerammer, nattbord og traller i dekontamineringsanlegg på klinikker og omsorgsområder

Omfang:

- Oppnår et strålende skylleresultat pga. svært god fukting av alle materialer
- God materialkompatibilitet, spesielt tilpasset de forskjellige materialene til sengerammer og nattbord
- Spesielt egnet for bruk med mykt vann
- Ved riktig bruk av neodisher TN påvirkes ikke biokompatibiliteten til de medisinske produktene som behandles (biologisk vurdering av medisinske produkter iht. EN ISO 10993-1)

Spesielle egenskaper:

- Oppnår en utmerket fukting, samt dråpe- og flekkfri tørking, også av plastdelene som er vanskelige å fukte
- Lavt forbruk
- Tørker jevnt og uten rester

Bruk og dosering:

neodisher TN kan brukes i kommersielle oppvaskmaskiner og dekontamineringsanlegg. neodisher TN doseres i siste skyllevann via en automatisk doseringsenhet. Dosering i henhold til vannkvalitet, type og material til utstyret som skal skylles og skylletemperatur. Optimal dosering av neodisher TN stilles inn når maskinen settes i gang.

Alt etter vannkvalitet, utstyret som skal skylles og skylletemperatur	0,1 - 0,8 ml/l
---	----------------

En spesiell vannbehandling må utføres ved hardt vann eller vann med høyt saltinnhold for å oppnå optimalt skylleresultat. Det anbefales å bruke demineralisert vann i sluttskyllingen for å unngå vannflekker.

Generelle henvisninger for bruk:

- Kun for yrkesmessig bruk.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Skylles med vann før produktskifte i doseringsystemer, inkl. sugeslanger.
- Vær oppmerksom på bruksanvisningene til produsenten av maskinen.
- Reprosesseringen må utføres i samsvar med lovgivningen om medisinsk utstyr og gjeldende forskrifter ved bruk av egnede validerte prosedyrer.
- Vær oppmerksom på represseringsanbefalinger fra produsenten av medisinsk utstyr tilsvarende kravene til DIN EN ISO 17664, represseringsanbefalinger fra produsenten av sengerammer og anbefalingene til arbeidsgruppen for dekontamineringsanlegg for sengerammer og vogner (AK-BWA) i aktuellutgave til AK-BWA-brosjyren "Maskinell dekontaminering".
- Må ikke fylles om i andre beholdere, flasker osv!

Tekniske data:

pH-verdi	6,7 - 7,0 (0,1 - 0,8 ml/l, bestemt i fullstendig avsaltet vann, 20 °C)
Viskositet	< 50 mPas (konsentrat, 20 °C)
Tetthet	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)



Innholdstoffer:

Ingredienser til rengjøringsmidler i henhold til EU-vaskemiddelforordning 648/2004:

< 5 % fosfonater, polykarboksylater

15 - 30 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer

i tillegg konserveringsmiddel

Reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-4-isotiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1)

CE-merking:

neodisher TN oppfyller kravene som følger av europeisk lovgivning om medisinsk utstyr.

Kontakt produsenten og ansvarlig myndighet, dersom det oppstår en alvorlig situasjon med dette produktet.

Henvisninger for oppbevaring/lagring:

En temperatur mellom 0 °C og 30 °C må overholdes ved lagring. Kan oppbevares i 3 år ved riktig lagring. Kan brukes til: se stempel på etiketten bak symbol .

Fare- og sikkerhetshenvisninger:

neodisher TN er ikke et farestoff iht. CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008.

Ved forskriftsmessig bruk er produktet ufarlig i henhold til de relevante matforedlingsdirektivene.

Beholdere må kun avhendes tomme og lukket. Avhending av materialrester: se sikkerhetsdatablad.

Ytterligere sikkerhets- og miljøinformasjoner finnes i sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige under www.drweigert.de i seksjonen "Service/downloads".

MB 3115/3-4
Utgave: 06/2021

